

Agenda/ instellingen bewerken

Als u met 2 of 3 vingers tegelijk van onder naar boven over het klok-scherm 'swiped' opent er een nieuw scherm met de opties "agenda" en "instellingen". Om uit dit menu te komen drukt u op de 'X' rechts boven in het blok.

Tablet instellingen

- ✓ Zorg dat het scherm van de tablet altijd 'AAN' staat. Kijk in de handleiding van uw tablet!
- ✓ Kies de gewenste schermhelderheid en het goede geluidsniveau (tbv alerts).
- ✓ Klok werkt horizontaal en verticaal.

activiteiten agenda

(UITSLUITEND: 'Notes', 'Connect' en 'Dayview')

Als u op "agenda" drukt opent zich het agenda menu. Deze heeft aan de linker kant een kalender met de huidige dag in wit aangegeven.

Aan de rechterkant legt u de afspraak of gebeurtenis vast met tijdstip en andere details.




Noteren van een nieuwe afspraak of gebeurtenis:

- ✓ Kies de gewenste dag.
- ✓ Druk op +.
- ✓ Stel de tijd in.
- ✓ Kies desgewenst uit de 5 vooringestelde mogelijkheden of schrijf eigen boodschap.
- ✓ Kies bij terugkerend 'event' uit: dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks.
- ✓ Druk op "bewaar".
- ✓ Druk op de X in de rechterbovenhoek als u klaar bent. Het scherm sluit. U kunt nu nog een afspraak of gebeurtenis toevoegen of sluiten.
- ✓ U ziet de 'activiteit(en)' nu in de meldingbalk onder de klok staan.

instellingen

(UITSLUITEND: 'Time+', 'Notes', 'Connect' en 'Dayview')

Als u op "instellingen" drukt opent zich het instellingen menu. Deze heeft aan de linker kant negen verschillende instellingen waarmee men het uiterlijk van de klok kan veranderen. Aan de rechterkant is plaats voor een fotogalerij.

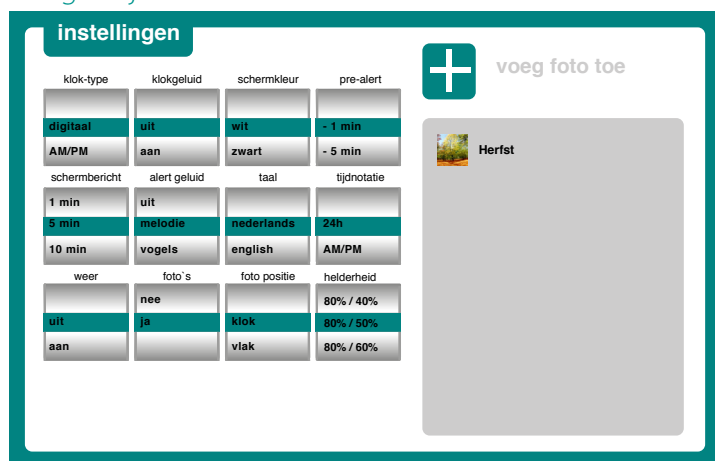

- ✓ Klok type: kies uit 4 klok typen: modern, klassiek, digitaal, AM/PM of dayview (geeft dag overzicht).
 - ✓ Klok tikken: Tikken van de analoge klok aan/uit.
 - ✓ Schermkleur: kies achtergrondkleur van de klok: wit, zwart of grijs.
 - ✓ Pre alert: Kies de start van het 1 minuut durende pre-alert.
 - ✓ Schermbericht: stel de tijd in dat bericht in scherm staat.
 - ✓ Alert geluid: Kies de gewenste alert-tone.
 - ✓ Achtergrond: Kies achtergrondkleur van de klok wit, zwart of grijs.
 - ✓ Taal: kies de gewenste taal.
 - ✓ Tijdnnotatie: 24h of AM/PM
 - ✓ Weer: aan of uit
 - ✓ Foto's: ja/nee. Bij meerdere foto's worden deze in een carroussel geplaatst.
 - ✓ Foto-positie: in 'wijzerplaat' of in de achtergrond.
 - ✓ Helderheid: helderheidscherm 'dag-nacht' aanpassen. (nacht: 23u- 6u)
- Druk op 'X' in de rechter-bovenhoek als u klaar bent.

Via www.clockaid.com de agenda's en het account beheren

Op afstand beheren

Invoeren op afstand via internet

- ✓ Log in op de homepage Clockaid.com, mbv email-adres en wachtwoord.
- ✓ Kies de Clockaid klok die u wilt bewerken.
- ✓ Vul de agenda in: datum, activiteiten, afspraken etc.
- ✓ Bewaar de opdrachten.

- 01** Vandaag **01** Dag met herhaal activiteiten
- 01** Geselecteerde dag **01** Dag met activiteiten

Producten & Account

Producten

Hier kunt u de Clockaid tablet of meerdere tablets voorzien van een herkenbare 'naam' (van gebruiker!). Dit is alleen relevant wanneer u 'op afstand' meerdere agenda's beheert.

Account

Bij Account kunt u de naam van de beheerder invullen/wijzigen.

GOEDE UITLEG AAN GEBRUIKER I.C. DE KLOK-KIJKER!

Tenslotte: het verdient aanbeveling om een goede uitleg van deze Clockaid klok te geven aan de gebruiker: dat Clockaid eigenlijk gewoon een klok is die altijd de juiste tijd, dag en datum geeft.

Maar dat deze ook helpt herinneren: aan het innemen van medicijnen, afspraken, etc. Toon het visuele signaal en kies samen het gewenste geluid. Controleer na enkele dagen en later met enige regelmaat of de gebruiker een en ander nog goed begrijpt en interpreteert.