

Agenda/ instellingen bewerken

Als u met 2 of 3 vingers tegelijk van onder naar boven over het klok-scherm 'swiped' opent er een nieuw scherm met de opties "agenda" en "instellingen". Om uit dit menu te komen drukt u op de 'X' rechts boven in het blok.

Tablet instellingen

- ✓ Zorg dat het scherm van de tablet altijd 'AAN' staat. Kijk in de handleiding van uw tablet!
- ✓ Kies de gewenste schermhelderheid en het goede geluidsniveau (tbv alerts).
- ✓ Klok werkt horizontaal en verticaal.

activiteiten agenda

(UITSLUITEND: 'Notes' en 'Connect')

Als u op "agenda" drukt opent zich het agenda menu. Deze heeft aan de linker kant een kalender met de huidige dag in wit aangegeven.

Aan de rechterkant legt u de afspraak of gebeurtenis vast met tijdstip en andere details.




Noteren van een nieuwe afspraak of gebeurtenis:

- ✓ Kies de gewenste dag.
- ✓ Druk op +.
- ✓ Stel de tijd in.
- ✓ Kies desgewenst uit de 5 vooringestelde mogelijkheden of schrijf eigen boodschap.
- ✓ Kies bij terugkerend 'event' uit: dagelijks, wekelijks of maandelijks.
- ✓ Druk op "bewaar".
- ✓ Druk op de X in de rechterbovenhoek als u klaar bent. Het scherm sluit. U kunt nu nog een afspraak of gebeurtenis toevoegen of sluiten.
- ✓ U ziet de 'activiteit(en)' nu in de meldingbalk onder de klok staan.

instellingen

(UITSLUITEND: 'Time+', 'Notes' en 'Connect')

Als u op "instellingen" drukt opent zich het instellingen menu. Deze heeft aan de linker kant negen verschillende instellingen waarmee men het uiterlijk van de klok kan veranderen. Aan de rechterkant is plaats voor een fotogalerij.

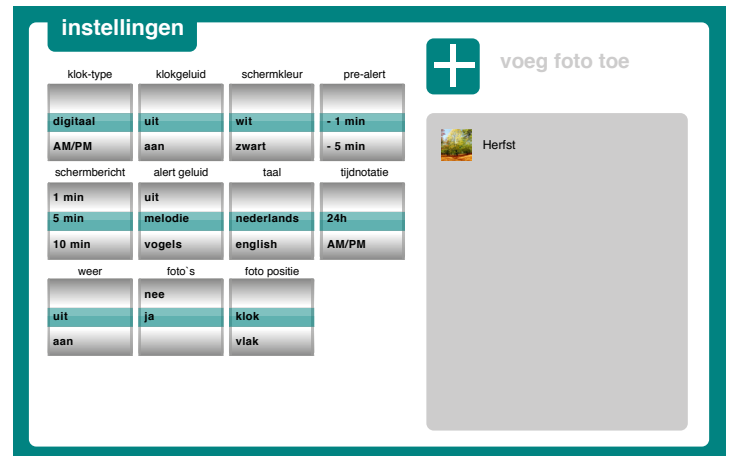

- ✓ Klok type: kies uit 4 klok typen: modern, klassiek, digitaal of AM/PM.
- ✓ Klok tikken: Tikken van de analoge klok aan/uit.
- ✓ Schermkleur: kies achtergrondkleur van de klok: wit, zwart of grijs.
- ✓ Pre alert: Kies de start van het 1 minuut durende pre-alert. Let op: stel de tablet in op de gewenste geluidsterkte!
- ✓ Alert geluid: Kies de gewenste alert-tone.
- ✓ Achtergrond: Kies achtergrondkleur van de klok wit, zwart of grijs.
- ✓ Taal: kies de gewenste taal.
- ✓ Tijdnnotatie: 24h of AM/PM
- ✓ Weer: aan of uit
- ✓ Foto's: ja/nee. Bij meerdere foto's worden deze in een carroussel geplaatst.
- ✓ Foto-positie: in 'wijzerplaat' of in de achtergrond.

Druk op 'X' in de rechter-bovenhoek als u klaar bent.

Via de website van Clockaid de agenda's en het account beheren

Wanneer u met uw inloggegevens bent ingelogd kunt u de agenda's, uw account beheren.

Op afstand beheren

Invoeren op afstand via internet

- ✓ Log in op de homepage Clockaid.com, mbv email-adres en wachtwoord.
- ✓ Kies de Clockaid klok die u wilt bewerken.
- ✓ Vul de agenda in: datum, activiteiten, afspraken etc.
- ✓ Bewaar de opdrachten en log uit of blijf ingelogd.

Log uit | info@clockaid.com

cløckaid™

CLOCKAID AGENDA KALENDER KLOK AGENDA'S BEHEREN CONTACT

Agenda bewerken van:

serial

Producten & account

activiteiten agenda

donderdag 16 juni

zo ma di wo do vr za

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

« JUNI 2016 »

voeg activiteit toe

geen activiteiten gevonden voor deze datum.

01 Vandaag

01 Geselecteerde dag

01 Dag met herhaal activiteiten

01 Dag met activiteiten

Producten & Account

Producten

Hier kunt u de Clockaid tablet of meerdere tablets voorzien van een herkenbare 'naam' (van gebruiker!). Dit is alleen relevant wanneer u 'op afstand' meerdere agenda's beheert.

Account

Bij Account kunt u de naam van de beheerder invullen/wijzigen.

Log uit | info@clockaid.com

cløckaid™

CLOCKAID AGENDA KALENDER KLOK AGENDA'S BEHEREN CONTACT

Producten

Nieuw serienummer

Voeg een serienummer toe

SERIENUMMER ZAL HIER GETOONT WORDEN

Serial

Alle wijzigingen opslaan

Account

E-mailadres

Voornaam*

Achternaam*

Straat*

Nr.*

Postcode*

Plaatsnaam*

Land*

Telefoonnummer*

Wachtwoord wijzigen

Huidig wachtwoord *

Nieuw wachtwoord *

Bevestig het nieuwe wachtwoord *

Alle wijzigingen opslaan

Annuleer

GOEDE UITLEG AAN GEBRUIKER I.C. DE KLOK-KIJKER!

Tenslotte: het verdient aanbeveling om een goede uitleg van deze Clockaid klok te geven aan de gebruiker: dat Clockaid eigenlijk gewoon een klok is die altijd de juiste tijd, dag en datum geeft.

Maar dat deze ook helpt herinneren: aan het innemen van medicijnen, afspraken, etc. Toon het visuele signaal en kies samen het gewenste geluid. Controleer na enkele dagen en later met enige regelmaat of de gebruiker een en ander nog goed begrijpt en interpreteert.